


## Resmed S9 Elite korte handleiding

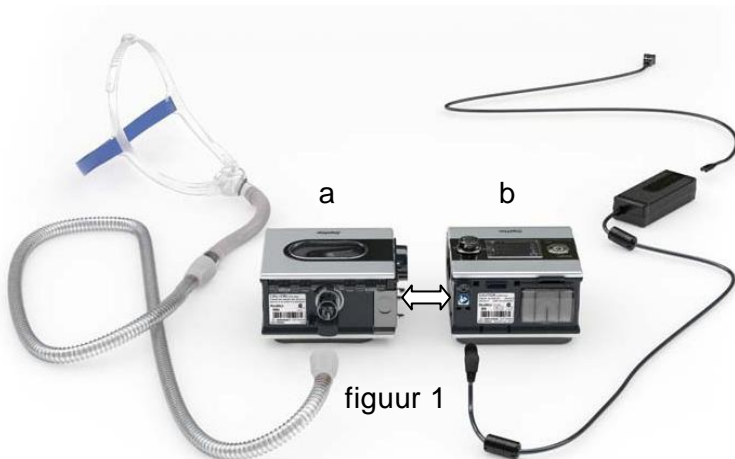


1) Bevestig de luchtbevochtiger (figuur 1a) aan de Resmed S9 Elite (figuur 1b). Sluit het netsnoer en de slang aan zoals hiernaast staat aangegeven (figuur 1)

2) Open de klep van de bevochtiger (figuur 2a) en vul het waterreservoir (figuur 2b) maximaal tot de 3<sup>e</sup> horizontaal gemarkeerde streep op het gele label in het waterreservoir (figuur 2c).

U kunt daarvoor gebruik maken van:

- kraanwater dat gekookt is en afgekoeld òf
- mineraalwater (zonder koolzuur) òf
- gedestilleerd water.


Sluit de klep van de bevochtiger daarna goed af (figuur 2d+e).

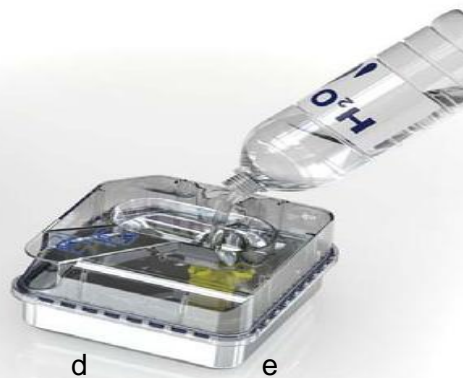

3) Plaats het neus- of mondneusmasker op het gezicht van de patiënt, let erop dat de hoofdbanden niet te strak zitten (er mogen geen drukpunten op het gezicht ontstaan), maar ook niet te los i.v.m. lekkage!

4) Koppel het masker aan de slang.

5) Druk op de start/stoptoets (figuur 3a) als de S9 Elite niet vanzelf aan gaat. Er verschijnt dan direct een oranje druppel in het scherm (= bevochtiging). Laat de patiënt rustig ademen en controleer of er lucht langs het masker blaast, of dat het masker niet te strak zit. Stel zo nodig het masker bij. (Zie punt 2 voor aanpassing).

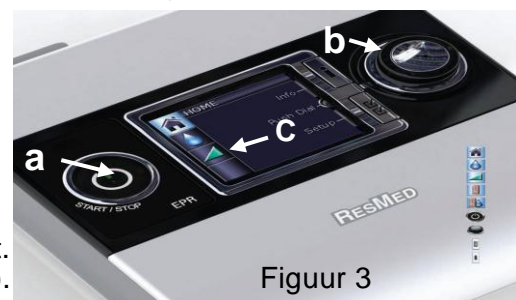

6) De bevochtiging (= oranje druppel zoals beschreven bij punt 4) kan worden ingesteld van stand 1 t/m 6. Stand 1 geeft minimaal vocht en stand 6 maximaal! Draai aan de knop (figuur 3b) tot de gewenste stand is bereikt en druk deze toets daarna in om de bevochtigingsstand te bevestigen (het oranje scherm met de zichtbare druppel verandert in blauw). Start met stand 3, mocht er een droge keelholte/ mond/ gevoelige neus/ loopneus optreden zet de bevochtiger dan iets hoger. Als er condensvorming in de slang optreedt zorg dan dat de kamertemperatuur boven de 15 graden blijft.

7) De softstart (figuur 3c) staat op een vaste stand ingesteld (= aantal minuten drukopbouw). De Resmed S9 Elite start vanzelf met de softstart en bereikt naar de ingestelde tijd de CPAP druk (=vaste druk).

Mocht de druk in de nacht hoog zijn en de patiënt wordt wakker, dan kan de patiënt het apparaat even uit en aan zetten met de in/uitschakeltoets. De druk zal dan tijdelijk verlagen.

8) Als de patiënt 's- morgens het masker af doet en er niet meer mee slaapt, maak dan de maskeringet schoon volgens de algemene schoonmaakinstructies. Gooi het waterreservoir leeg en spoel deze om met schoon water. Vul het bakje pas weer met water als de patiënt gaat slapen.

9) Loop nooit met het apparaat wanneer het waterreservoir nog op de CPAP zit!