



Algemene schoonmaakinstructies

Masker

De zachte delen van het masker die de huid raken (de maskerinzet en de kussens van het voorhoofdsteuntje) dienen elke dag gereinigd te worden met warm water en afwasmiddel.

De harde delen van het masker (tezamen het frame genoemd) dienen eens per week gereinigd te worden met afwasmiddel.

De hoofdbandages kunnen in een handwas worden gewassen. Niet in de wasmachine aangezien de klittenband dan stuk gaat.

Grijze inzetstukken van het Fisher & Paykel masker mogen uitsluitend gereinigd worden met een zachte vochtige doek. Nooit afspoelen en daarna uitknijpen/uitwringen.

Gel inzetstukken kunnen worden gereinigd met afwasmiddel. Gebruik een zachte schone doek en wrijf niet te hard omdat anders de beschermlaag stuk gaat.

Filters van het apparaat

Foam/sponsachtige filters dienen elke week gereinigd te worden met water en eventueel zeep.

Fijn/stoffilters dienen elke maand vervangen te worden.

Cassettes van Hoffrichter dienen elk kwartaal te worden vervangen.

Slang

De slang dient elke week gespoeld te worden met schoon warm water.

Eventueel de slang eerst spoelen met een zeepoplossing en daarna doorspoelen.

Als uw slang een drukmeetslang bevat, dan dienen eerst de meegeleverde dopjes geplaatst te worden zodat er geen water in de drukmeetslang komt.

Bevochtiger

De bevochtigingskamer dient elke dag geleegd te worden. 's Avonds voor het gebruik van het apparaat dient de bevochtiger gevuld te worden met schoon bronwater of afgekoeld gekookt water. Dit om de hoeveelheid kalkaanslag te beperken.

Een keer per week de bevochtigingskamer volledig reinigen met een ontkalkingsmiddel (bijvoorbeeld schoonmaakazijn), verdund met water.

Mocht de slang van uw apparaat een drukmeetslang bevatten, die word doorgevoerd in de bevochtigingskamer, dan dienen eerst de meegeleverde dopjes geplaatst te worden op de in/uitgang van de doorgang naar de drukmeetslang, op uw bevochtigingskamer.

	Elke dag	Elke week	Elke maand
Masker			
Zachte delen masker	Met afwasmiddel		
Harde delen masker		Met afwasmiddel	
Hoofdbandage			Eventueel in handwas
Filters			
Foam filters		Met water	
Fijn filter			Vervangen
Slang		Met water	
Bevochtiger	Schoon water erin	Ontkalken	