

## Schoonmaakinstructie voor Fisher&Paykel maskers.

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij naar de bij het masker geleverde gebruikersinstructies.

### Algemeen:

- Niet in de vaatwasser reinigen.
- Niet schoonmaken met behulp van alcohol, chloor- of bleekmiddel.
- Schuimkussen (Foam) **niet** in water onderdompelen en/of uitknijpen.
- Hoofdband in lauw water reinigen met een mild wasmiddel (iedere 7 dagen).
- Onderdelen niet in direct zonlicht laten drogen.

### HC405/406/407 Zest/Zest petite/Zest plus Neusmaskers:

- Siliconen afdichting, hoekstuk en masker schoonmaken in een handwarm sopje (bijvoorbeeld Biotex) en vervolgens afspoelen met schoon water.
- **Het grijze schuimkussen (Foam) schoonmaken met een vochtige doek. (NIET onder water dompelen en/of uitknijpen)**
- Onderdelen laten drogen en het masker opnieuw in elkaar zetten.
- Bij de HC405: vervang zonodig het filter.

### HC431 Full-Face Masker:

- Siliconen afdichting, hoekstuk met non-rebreathing klep en masker schoonmaken in een handwarm sopje (bijvoorbeeld Biotex) en vervolgens afspoelen met schoon water.
- Onderdelen laten drogen en het masker opnieuw in elkaar zetten. Non-rebreathing klep op juiste werking controleren.

### HC432 en Forma (S/M/L/XL):

- Siliconen afdichting, hoekstuk met non-rebreathing klep en masker schoonmaken in een handwarm sopje (bijvoorbeeld Biotex) en vervolgens afspoelen met schoon water.
- **Het grijze schuimkussen (Foam) schoonmaken met een vochtige doek. (NIET onder water dompelen en/of uitknijpen)**
- Onderdelen laten drogen en het masker opnieuw in elkaar zetten.

### HC452 Oracle:

- Snap-flap, softseal, hoekstuk, ring en slang schoonmaken en 10 min. laten liggen in een oplossing van 1 liter water en 50ml ontsmettende mondspoeling (bijvoorbeeld Sterident). Hierna afspoelen met schoon water.
- Onderdelen laten drogen en het masker opnieuw in elkaar zetten.

### HC482 Opus:

- Siliconen neuskussens losmaken van het masker. Onderdelen schoonmaken in een handwarm sopje (bijvoorbeeld Biotex) en vervolgens afspoelen met schoon water.
- Onderdelen laten drogen en het masker opnieuw in elkaar zetten.