

SEQUAL®

1 NEEM DE ECLIPSE UIT DE VERPAKKING



ECLIPSE



UNIVERSEEL KARRETJE



WISSELSTROOM-VOEDINGSBRON MET NEMA-NETSNOER



* Afbeelding van Amerikaans netsnoer. Klanten in andere landen krijgen eventueel een verschillend netsnoer.

GELIJKSTROOM-VOEDINGSBRON



POWER CARTRIDGE (BATTERIJ)



eclipse3™ with autoSAT

2 KENNISMAKING MET DE ECLIPSE

Raadpleeg de handleiding van de Eclipse voor meer gedetailleerde informatie over de werking en de zorg. Lees alle waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en aanvullende informatie over het apparaat.



VOORKANT




ACHTERKANT

eclipse3™ with autoSAT

3 INSCHAKELEN VAN DE ECLIPSE

Aansluiting op wisselstroomvoedingsbron: Plaats het netsnoer goed in de externe contactdoos aan de rechterkant van het apparaat. Steek de stekker in een geaard wisselstroomstopcontact.

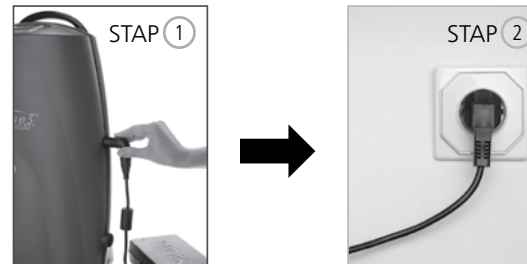

Wanneer de Eclipse goed is aangesloten, licht een groene indicator op de wisselstroomvoedingsbron op en verschijnt op het bedieningspaneel de **indicator Externe stroombron**.

Installatie van de batterij: Schuif de batterij in de lege ruimte totdat hij goed vastzit en gelijk is met de achterzijde van het apparaat.



Zodra de batterij goed geïnstalleerd is en de Eclipse AAN staat, verschijnt op het bedieningspaneel de Power Cartridge-statusaanwijzer.



AAN/UIT-indicator (groen)

Houd de "AAN/UIT"-knop twee (2) seconden ingedrukt om de **ECLIPSE IN TE SCHAKELEN**. U hoort en ziet vervolgens een korte zelftest. Controleer of alle indicatoren oplichten en de zoemer drie (3) seconden lang weerklinkt. Houd de "AAN/UIT"-knop twee (2) seconden ingedrukt om de **ECLIPSE UIT TE SCHAKELEN**.

eclipse3™ with autoSAT

4 SELECTEREN VAN STROOM-ZUURSTOFMODUS

Knop en indicator voor stroommodus

Druk op de knop Stroommodus om de gewenste stroommodus te selecteren. U kunt tussen de modi Continue stroom en Pulsdosis schakelen door deze knop herhaaldelijk in te drukken. De stroominstellingen in beide modi moeten u door uw arts worden voorgeschreven.

5 AANPASSEN VAN DE ZUURSTOF-STROOMSNELHEID AAN HET VOORGESCHREVEN NIVEAU


Knop voor verhogen of verlagen van zuurstofstroomsnelheid

Pas de zuurstofstroomsnelheid aan de door uw arts voorgeschreven instelling aan met de + / - knoppen.

Weergave modus Continue stroom



Weergave modus Pulsdosis

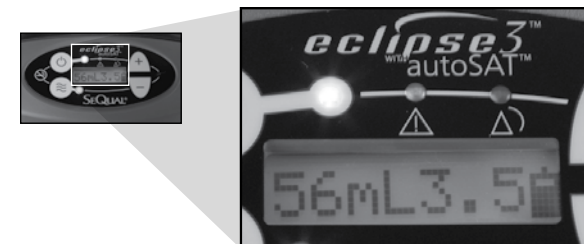

WAARSCHUWING: **WIJK NIET AF VAN DE VOORGESCHREVEN INSTELLING. RAADPLEEG UW ARTS OF EEN BEVOEGD CLINICUS ALVORENS DE VOORGESCHREVEN INSTELLING TE WIJZIGEN.**

Noteer het **serienummer** dat zich onderaan op het apparaat bevindt. U kunt het in uw Eclipse 3-paspoort opschrijven. U hebt het later nodig om het product te registreren.

eclipse3™ with autoSAT

6 EERSTE GEBRUIK VAN DE ECLIPSE

Luchtinlaatfilter



Uw apparaat is uitgerust met een luchtinlaatfilter (extra filter meegeleverd). Controleer hem dagelijks en maak hem eenmaal per week schoon.

Sluit de zuurstofslang aan op de zuurstofuitlaat en de zuurstofcanule volgens de bij de canule meegeleverde instructies of volgens de instructies van uw thuiszorgverlener.



Adem normaal door de neuscanule.

Wanneer het apparaat op de batterij werkt, zorgt de modus Pulsdosis ervoor dat deze langer opgeladen blijft.

7 WERKING VAN HET UNIVERSELE KARRETJE

Lijn de locatiegaten onderaan op het apparaat uit op de lipjes van het universele karretje. Breng de lange draadschroef op één lijn met het inzetstuk achteraan op de Eclipse. Draai vervolgens de knop van het karretje handmatig vast totdat het universele karretje goed aan het apparaat vastzit. Druk op de knop van de handgreep van het universele karretje om de hoogte ervan te verstellen.



Bezoek www.sequal4me.com voor nadere informatie over de Eclipse 3, een volledige lijst met verkrijgbare accessoires, reistips en koppelingen naar nuttige websites.