


ResMed Autoset Spirit II verkorte handleiding IF.VVN.30.10.1

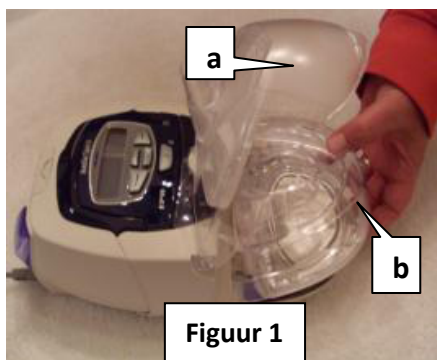


Figuur 1

1) Open de doorzichtige klep (a) aan de voorkant van de bevochtiger en neem het waterreservoir eruit (figuur 1). Vul het waterreservoir (b) tot het gemarkeerde gedeelte. U kunt daarvoor gebruik maken van

- kraanwater dat gekookt is en afgekoeld òf
- mineraalwater (zonder koolzuur) òf
- gedestilleerd water.

2) Plaats het waterreservoir terug in het apparaat en sluit klep (a) goed tot er een “klik” hoorbaar is.

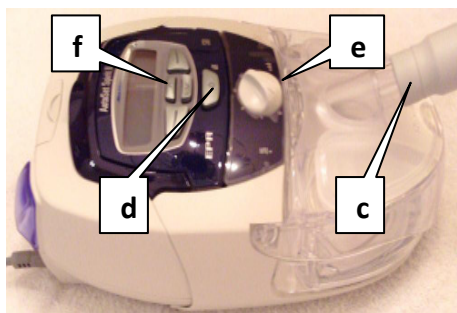

3) Koppel de slang aan het apparaat (c).

4) Plaats het neus- of mondneusmasker op het gezicht van de patiënt, let erop dat de hoofdbanden niet te strak zitten (er mogen geen drukpunten op het gezicht ontstaan), maar ook niet te los i.v.m. lekkage!

5) Koppel het masker aan de slang.

6) Zorg voor stroomtoevoer en zet met de in/uitschakeltoets (d) het apparaat aan. Het is mogelijk dat het apparaat is ingesteld op automatische start (dit kan alleen bij neusmaskers, niet bij full-face maskers). Het apparaat start dan vanzelf nadat er een paar keer diep in het masker geademd wordt. Laat de patiënt rustig ademen en controleer of er geen lucht langs het masker blaast, of dat het masker niet te strak zit. Stel zo nodig het masker bij. (Zie punt 4 voor aanpassing).

7) De bevochtiger kan worden ingesteld met de bevochtigersknop (e). Start met stand II, mocht er een droge keelholte/ mond/ gevoelige neus/ loopneus optreden zet de bevochtiger dan iets hoger. Als er condensvorming in de slang optreedt zorg dan dat de kamertemperatuur boven de 15 graden blijft.

8) **Bij CPAP modus:** start de S8 op een lage druk (bv. 4 cm H₂O) en loopt op de ingestelde tijd op naar de druk die nodig is om de luchtwegen open te houden (de therapiedruk, bv 8cm H₂O). De opbouwtijd is aan te passen d.m.v. de twee middelste pijltoetsen (f). Met de pijl omhoog kan de aanlooptijd verlengd worden tot de maximaal ingestelde tijd (bv. max 30 minuten). Met de pijl omlaag kan de aanlooptijd verkort of uitgezet worden. Indien deze uitgezet wordt begint het apparaat gelijk op de ingestelde therapiedruk.

9) **Bij APAP modus:** start de S8 op een lage druk (bv. 4 cm H₂O). De druk loopt automatisch op als de luchtweg nauwer wordt (bv. tijdens een apneu) tot een maximaal ingestelde druk, zodat de luchtweg tijdens de slaap open blijft.

10) Als de patiënt 's- morgens het masker af doet en er niet meer mee slaapt, maak dan de maskerinzet schoon volgens de algemene schoonmaakinstructies. Gooi het waterreservoir leeg en spoel deze om met schoon water. Vul het bakje pas weer met water als de patiënt gaat slapen.

11) Loop nooit met het apparaat wanneer het waterreservoir nog op de CPAP zit!