

Weinmann Somnosmart 2 verkorte handleiding IF.VVN.33.10.1




1) Bevestig de luchtbevochtiger (1) tussen de Somnosmart en de slang. Open de rubber dop (2) van de bevochtiger en vul het waterreservoir maximaal tot de horizontaal gemarkeerde streep op de deksel (3). U kunt daarvoor gebruik maken van:

- kraanwater dat gekookt is en afgekoeld òf
- mineraalwater (zonder koolzuur) òf
- gedestilleerd water.

2) Plaats het neus- of mondneusmasker op het gezicht van de patiënt, let erop dat de hoofdbanden niet te strak zitten (er mogen geen drukpunten op het gezicht ontstaan), maar ook niet te los i.v.m. lekkage!



3) Koppel het masker aan de slang.
4) Zorg voor stroomtoevoer en zet met de in/uitschakeltoets (a) het apparaat aan. Indien u een ^A in de display ziet staan start het apparaat automatisch na een paar ademhalingen. Laat de patiënt rustig ademen en controleer of er geen lucht langs het masker blaast, of dat het masker niet te strak zit. Stel zo nodig het masker bij. (Zie punt 2 voor aanpassing)

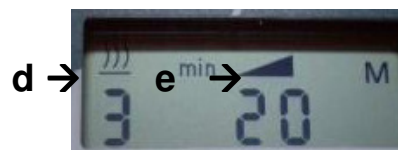

5) Let erop dat u de hierboven afgebeelde symbolen (d en e) in de display ziet, zo niet schakel deze functie dan in door de ramp- toets (b) en bevochtigingstoets (c) in te drukken. De softstarttoets (b) staat op een vaste stand ingesteld (= aantal min. drukopbouw). De Somnosmart 2 is een APAP, dat betekent dat dit apparaat automatisch de benodigde druk geeft met de instellingen zoals de arts heeft aangevraagd. Mocht de druk in de nacht hoog zijn en de patiënt wordt wakker, dan kan de RAMP-toets (b) door de patiënt worden ingedrukt. De druk zal dan tijdelijk verlagen.

6) De bevochtigingstoets (c) kan worden ingesteld van stand 1 t/m 6. Stand 1 geeft minimaal vocht en stand 6 maximaal! Druk op toets c en houdt deze ingedrukt tot het bevochtigingsteken in de display gaat knipperen. Laat de toets dan los en zet de bevochtiger hoger met toets c, druk de toets steeds opnieuw in tot de gewenste stand is bereikt (maximale stand = 6, daarna start de teller gewoon weer bij stand 1).

Als de gewenste stand bereikt is druk dan geen knoppen meer in. Het knipperende bevochtigingsteken zal dan continue in de display blijven staan. Start met stand 2, mocht er een droge keelholte/ mond/ gevoelige neus/ loopneus optreden zet de bevochtiger dan iets hoger. Als er condensvorming in de slang optreedt zorg dan dat de kamertemperatuur boven de 15 graden blijft.

7) Als de patiënt 's- morgens het masker af doet en er niet meer mee slaapt, maak dan de maskerinzet schoon volgens de algemene schoonmaakinstructies. Gooi het waterreservoir leeg en spoel deze om met schoon water.

Let op: er mag nooit water in de drukmeetslang komen, gebruik daarom altijd de bijgeleverde rode dopjes om de kleine binnenslang in de deksel van bevochtiger af te sluiten bij contact met water. Vul het bakje pas weer met water als de patiënt gaat slapen.

8) Loop nooit met het apparaat wanneer het waterreservoir nog op de CPAP zit!