


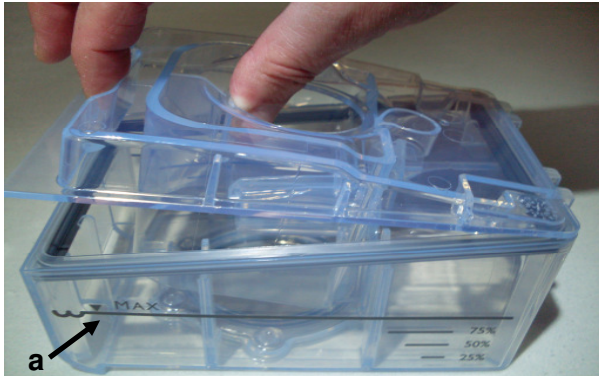


Figuur 1



Figuur 2



Figuur 3

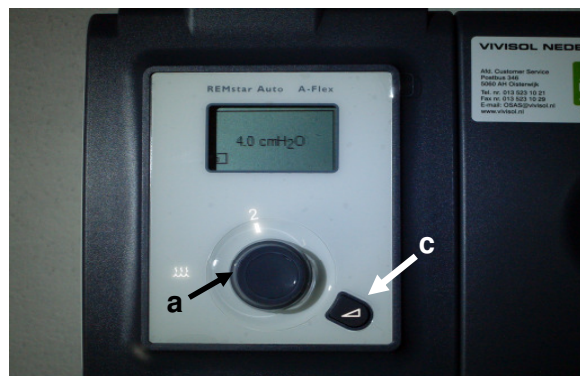

Figuur 4

1) Bevestig de luchtbevochtiger (figuur 1a) aan de Remstar Auto A-flex (figuur 1b)  
 Sluit het netsnoer en de slang aan zoals in figuur 1 staat aangegeven  
 Open de klep van de bevochtiger (figuur 2a) en vul het waterreservoir via de vulopening (figuur 3a) maximaal tot de 4<sup>e</sup> horizontaal gemarkeerde streep (=max) op het waterreservoir (figuur 3a). U kunt daarvoor gebruik maken van:  
 - kraanwater dat gekookt is en afgekoeld òf  
 - mineraalwater (zonder koolzuur) òf  
 - gedestilleerd water.

Sluit de klep van de bevochtiger daarna goed af!

2) Plaats het neus- of mondneusmasker op het gezicht van de patiënt, let erop dat de hoofdbanden niet te strak zitten (er mogen geen drukpunten op het gezicht ontstaan), maar ook niet te los i.v.m. lekkage!

3) Koppel het masker aan de slang.

4) Druk op de start/stoptoets (figuur 4a) als de Remstar Auto A-flex niet vanzelf aan gaat. Laat de patiënt rustig ademen en controleer of er lucht langs het masker blaast, of dat het masker niet te strak zit. Stel zo nodig het masker bij. (Zie punt 2 voor aanpassing).

5) De bevochtiging kan worden ingesteld van stand 1 t/m 6. Stand 1 geeft minimaal vocht en stand 6 maximaal! Draai aan de knop (figuur 4a) tot de gewenste stand is bereikt. Start met stand 3, mocht er een droge keelholte/ mond/ gevoelige neus/ loopneus optreden zet de bevochtiger dan iets hoger. Als er condensvorming in de slang optreedt zorg dan dat de kamertemperatuur boven de 15 graden blijft.

6) De softstart /rampknop (figuur 3c) staat op een vaste stand ingesteld (= aantal minuten drukopbouw).

De Remstar Auto A-flex kan op APAP (automatisch) of op CPAP (vaste druk) zijn ingesteld. Mocht de druk in de nacht hoog zijn en de patiënt wordt wakker, dan kan hij/zij de Softstarttoets (figuur 4c) indrukken. De druk zal dan tijdelijk verlagen.

7) Als de patiënt 's- morgens het masker af doet en er niet meer mee slaapt, maak dan de maskerinzet schoon volgens de algemene schoonmaakinstructies. Gooi het waterreservoir leeg en spoel deze om met schoon water (zie voor manier van openen figuur 3). Vul het bakje pas weer met water als de patiënt gaat slapen.

8) Loop nooit met het apparaat wanneer het waterreservoir nog op de CPAP zit!