

## Schoonmaakinstructies Resmed H4I bevochtiger



Figuur 1



Figuur 2



Figuur 3



Figuur 4



Figuur 5



Figuur 6



Figuur 7



Figuur 8



Figuur 9

### Dagelijks

- Open klep (Figuur 1)
- Verwijder het waterreservoir (Figuur 2)
- Leeg het waterreservoir
- Spoel het waterreservoir goed om met handwarm schoon leidingwater
- Laat het bakje aan de lucht drogen
- Vul het bakje pas weer voor het slapen gaan met:
  - kraanwater dat gekookt is en afgekoeld of
  - mineraalwater (zonder koolzuur) of
  - gedestilleerd water

### Wekelijks

- Open klep (Figuur 1)
- Verwijder het waterreservoir (Figuur 2)
- Leeg het waterreservoir
- Spoel het waterreservoir goed om met handwarm schoon leidingwater
- Vul de gele reinigingsplug tot aan de rand met schoonmaakazijn en schenk dit in het lege waterreservoir (Figuur 3)
- Voeg schoon koud leidingwater toe tot aan de lijn "MAX" (Figuur 4)
- Zet de gele reinigingsplug omgekeerd op het waterreservoir (Figuur 5)
- Laat het geheel 10 minuten staan
- Schudt het bakje en houdt de gele reinigingsplug hierbij goed vast
- Leeg het reservoir en keer het om
- Verwijder de kuipplaat (Figuur 6)
- Verwijder de kuipplaatafdichtring (Figuur 7)
- Was het geheel in een handwarm afwassopje om de azijnlucht uit het bakje te verwijderen
- Spoel alles om met schoon leidingwater en droog het af of laat het aan de lucht drogen

### Zet alles weer in elkaar op onderstaande wijze

- Houdt het waterreservoir omgekeerd
- Leg de kuipplaatafdichtring in de daarvoor bestemde groef (Figuur 7)
- Bevestig de kuipplaat weer door de twee lippen in de daarvoor bestemde opening te steken (Figuur 8)
- Zet de kuipplaat weer voorzichtig vast met de daarvoor bestemde sluiting (Figuur 6 en Figuur 9).

### Let op! Mocht de kuipplaat moeilijk sluiten:

1. controleer dan of de kuipplaatafdichtring goed in de groef zit en
2. controleer of de twee lippen goed in de openingen steken.

Ten slotte: Loop nooit met het apparaat als de bevochtiger gevuld is met water en aangesloten is op de CPAP/APAP.