


VERKORTE HANDLEIDING PHILIPS RESPIRONICS DREAMSTATION

- 1) Plaats het apparaat op een stabiel, horizontaal oppervlak
- 2) Steek de stekker in de zijkant van het apparaat en sluit het ene uiteinde van het elektriciteitsnoer aan op de voedingseenheid, en doe de stekker in het stopcontact (afbeelding 1)
- 3) Sluit de luchtslang aan op de luchtuitleat aan de achterkant van het apparaat (afbeelding 3, nummer 9)
- 4) Sluit het vrije uiteinde van de luchtslang aan op het masker

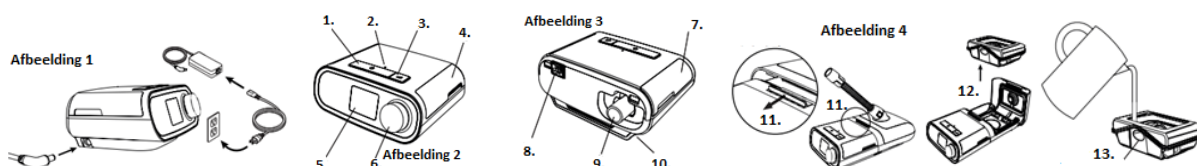

Indien u gebruik maakt van de bevochtiger, volg dan onderstaande stappen:


- 1) Koppel de bevochtiger aan het apparaat, door ze tegen elkaar aan te drukken. Indien nodig haalt u eerst de slang van het apparaat (afbeelding 4)
- 2) Verschuif het veerslot (afbeelding 4, nummer 11) en klap de deksel open (nummer 12)
- 3) Pak de waterkamer uit de bevochtiger en vul deze met water (dat weinig tot geen kalk bevat). Vult u de waterkamer niet boven de maximale vullijn. Deze is met een witte stippellijn aangegeven (afbeelding 4, nummer 13).
- 4) Plaats de waterkamer terug in de bevochtiger en sluit de deksel weer
- 5) Sluit de luchtslang nu aan de bovenzijde van de bevochtiger aan (afbeelding 4)

STAPPENPLAN AVOND/OCHTEND

avond	ochtend
1) Indien u de bevochtiger gebruikt: vul het bakje met water	1) Zet het apparaat uit door eenmaal op de aan/uitknop te drukken (afbeelding 2, nummer 1)
2) Zet uw masker op	2) Zet uw masker af
3) Zorg dat het masker gekoppeld is aan de slang, en de slang aan het apparaat	3) Indien u de bevochtiger gebruikt: pak de waterkamer uit de bevochtiger en giet deze leeg
4) Zet het apparaat aan, door eenmaal op de aan/uitknop te drukken (afbeelding 2, nummer 1). Indien een lagere startdruk gewenst is, druk dan één keer op de knop met de driehoek (afbeelding 2, nummer 3)	4) Maak het zachte deel van het masker schoon met water en afwasmiddel

TER INFO

- Verplaats het apparaat niet als er water in de bevochtiger zit.
- **Bevochtiging:** u kunt de temperatuur/luchtvochtigheid van de lucht wijzigen (stand 1 t/m 5).

Als het apparaat aan staat ziet u rechtsonder in de display 3 verticale golfjes , gevolgd door een getal. Dit getal bepaalt de luchtvochtigheid. Door aan de rechter ronde knop (afbeelding 2, nummer 6) te draaien, kunt u het getal naast de golfjes wijzigen. Hoe hoger het getal, des te warmer en vochtiger de lucht.