
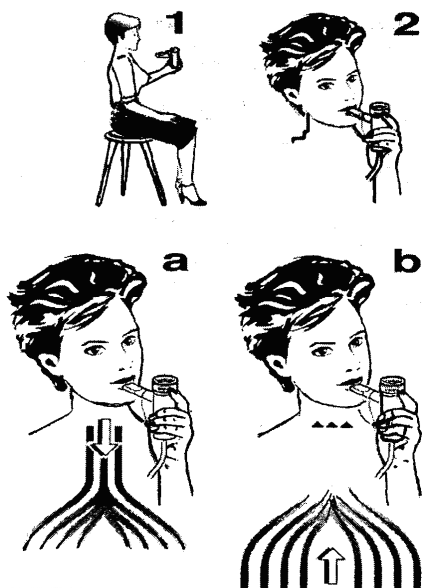
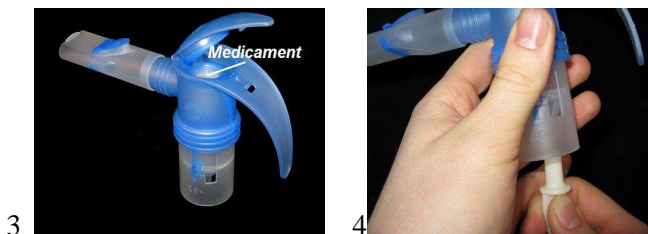
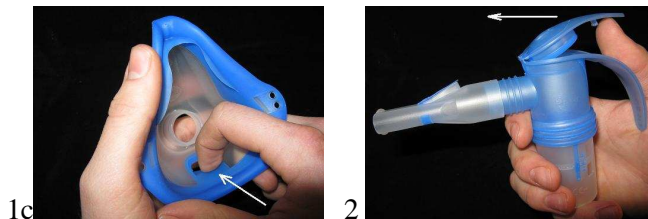


VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING:

Uw arts heeft voor uw behandeling een medicijnverneveltherapie voorgeschreven.

Dankzij de Aanvullende Zorg van Huisman Mediap kan de verneveling nu bijna overal veilig en verantwoord plaats vinden

Huisman Mediap licht u en uw huisgenoten in over het juiste gebruik van de apparatuur. Aan deze voorlichting en instructie wordt veel aandacht geschonken.

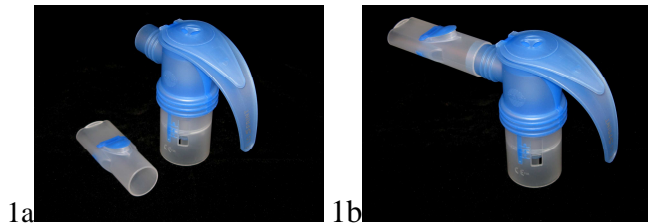

A) INGEBRUIKNAME PARI TURBOBOY SX

Overtuig u ervan dat de vernevelaar sinds het laatste gebruik gereinigd is (zie REINIGING).

1) Het mondstuk met het ventiel plaatsen (zie afbeelding 1a en 1b).

Indien een masker gebruikt wordt moet u het uitademventiel open zetten (zie afbeelding 1c).

2) Vernevelaar bovendeel met inademventiel openen.

U dient de deksel open te maken door met uw duim onderaan tegen het deksel te drukken.

3) Medicament volgens aanwijzing van de arts in het vernevelaaronderdeel vullen (maximaal 8 ml).

4) Het bovendeel van de vernevelaar naar beneden dichtdrukken

5) De vernevelaar rechtop houden. Lucht slang van de compressor aan de onderkant van de vernevelaar bevestigen.

Controleer of alle delen goed aangesloten zijn.

Wees er zeker van dat de luchtslang op de compressor stevig is aangekoppeld.

Door een verkeerd gemonteerde of aangesloten vernevelaar kan de verneveling van de medicamenten nadelig beïnvloeden.

B) INHALATIE

1 Plaats het apparaat op een vlakke stevige ondergrond. Apparaat inschakelen en vervolgens ontspannen en rechtop gaan zitten.

a Mondstuk met de lippen en tanden omsluiten en langzaam inademen.

b Ontspannen door het mondstuk uitademen. De uitgedemde lucht zal door het uitademventiel in het mondstuk afgevoerd worden.

Handelingen a en b herhalen tot er geen nevel meer uit de vernevelaar komt.

TECHNISCHE GEGEVENS:

230-240V - / 50Hz / 1,7 kg / 19,2x14,5x15 cm

LET OP: PARI TURBOBOY SX is een elektrisch aangedreven apparaat. Verwijder altijd het netsnoer als u de compressor met een vochtig doekje gaat reinigen.

- **Bij plaatsen stekker in het apparaat , de stekker goed aandrukken! Indien stekker niet goed geplaatst is kan er in de stekker kortsluiting optreden.**
- **Als stekker is geplaatst, het net snoer NIET om het apparaat winden. Ook hierdoor kan kortsluiting ontstaan.**



Afbeelding 5: Pari Boy SX



Afbeelding 6: LC Sprint Vernevelaar



Afbeelding 7: Lucht slang

- 1) Netschakelaar
- 2) Lucht slang aansluiting
- 3) Inlaatfilter
(verwijderen door met een muntstuk het filter tegen de klok in los te draaien)
- 4) Houder voor LC Sprint vernevelaar



C) REINIGING

Na gebruik blijft er een kleine hoeveelheid van het medicament achter. Dit verontreinigt de volgende vulling of geeft aanleiding tot een storing door een verstopte sproeier. Om infecties te voorkomen, dienen alle delen van de LC Sprint vernevelaar na ieder gebruik gereinigd worden.

Bij een verstopte sproeier meermaals reinigen of de vernevelaar uitkoken cq. vervangen.

Alle delen van de PARI LC SPRINT vernevelaar kunnen ook in de vaatwasmachine (min 60°C) gereinigd worden. Zie onderstaande procedure voor reiniging:

- 1) Lucht slang van de vernevelaar afnemen;
- 2) Mondstuk, inademventiel en bovendeeel van de vernevelaar verwijderen;
- 3) Alle delen van de vernevelaar huishoudelijk schoon maken met een beetje afwasmiddel;
- 4) Onder stromend warm water (minimaal 60° C.) goed afspoelen, vervolgens laten afdruipe;
- 5) Vernevelaar delen van binnen en van buiten met een schone, niet pluizende doek afdrogen. Open laten liggen tot volledige droging. Het drogen kan met een föhn versneld worden;
- 6) Vernevelaar na het drogen weer in elkaar zetten (**let op dat u de onderdelen juist terugplaatst**).

DESINFECTIE

Advies: 1 x per week vernevelaaronderdelen uitkoken.

Vooraf reinigen zoals omschreven onder (C) i.p.v. de vernevelaar onder stromend water af te spoelen, kookt u de vernevelaar met onderdelen (**zonder luchtslang**) uit in water, gedurende minimaal 15 minuten.

Gebruik hiervoor uiteraard een schone pan. Eventueel tussentijds desinfecteren met alcohol 70% .

TOEBEHOREN

- 052514231011 LC SPRINT, Year Pack S blauw
- 052514236015 LC SPRINT SP met mondstuk
- 052514414593 LC/LL, luchtslang 220 cm m/f ST
- 052514414852 Inlaatfilter, universeel
- 052514410740 Masker, volwassen zacht met elastiek
- 052514410742 Masker, kind zacht type Starfish

ALGEMEEN

- Vernevelaar slechts voor één patiënt gebruiken
- Alle delen "reinigen" zoals beschreven (uitgezonderd luchtslang) en daarna goed laten drogen
- 1 x per jaar filter vervangen
- 1 x per jaar LC Sprint vernevelaar vervangen met luchtslang
- 1 x per 6 weken LC Sprint SP vernevelaar vervangen