



Verkorte Handleiding ResMed AirSense 10 Autoset en Elite

Opstelling



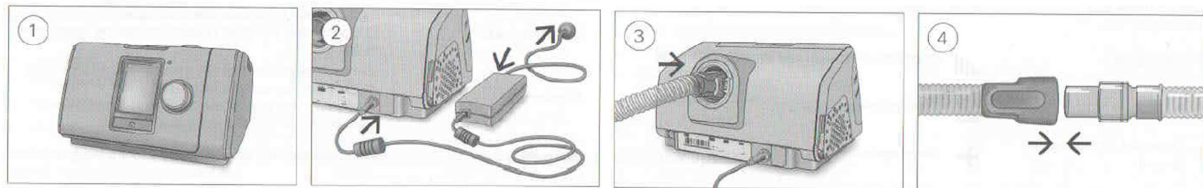

- 1) Plaats het apparaat op een stabiel, horizontaal oppervlak
- 2) Steek de stekker in de achterkant van het apparaat en sluit het ene uiteinde van het elektriciteitsnoer aan op de voedingseenheid en doe de stekker in het stopcontact
- 3) Sluit de luchtslang aan op de luchtuitlaat op de achterkant van het apparaat
- 4) Sluit het vrije uiteinde van de luchtslang aan op het masker

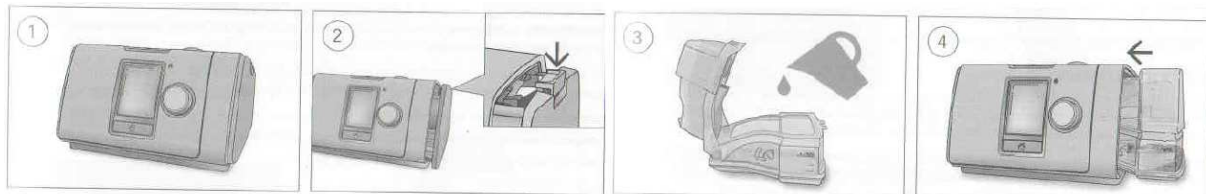Indien u gebruik maakt van de bevochtiger, volg dan onderstaande stappen:



- 1) Plaats het apparaat op een stabiel, horizontaal oppervlak
- 2) Neem het zijdeksel van het apparaat door op de clip van het zijdeksel te drukken en het deksel uit het apparaat te schuiven
- 3) Open de bevochtiger en vul het tot aan de markering voor maximaal waterpeil met water (dat weinig tot geen kalk bevat)
- 4) Sluit de bevochtiger en schuif deze in de zijkant van het apparaat

Stappenplan avond/ochtend

Avond	Ochtend
1) Indien u de bevochtiger gebruikt: vul het bakje met water	1) Zet het apparaat uit  (druk 1x op de aan/uitknop bovenop het apparaat)
2) Zet het masker op	2) Zet uw masker af
3) Zorg dat het masker gekoppeld is aan de slang, en de slang aan het apparaat	3) Indien u de bevochtiger gebruikt: haal de bevochtiger van het apparaat af en giet deze leeg
4) Zet het apparaat aan  (druk 1x op de aan/uitknop bovenop het apparaat)	4) Maak het zachte deel van het masker schoon met water en afwasmiddel

Tips:

- Als u 's nachts wakker wordt en u ervaart de druk als onprettig, zet het apparaat dan uit, en opnieuw aan. Het apparaat zal weer op een lage druk beginnen.
- Verplaats het apparaat niet als er water in de bevochtiger zit.
- Bevochtiging: u kunt de temperatuur/luchtvochtigheid van de lucht wijzigen (stand 1 t/m 8) in het **Mijn opties** menu bij **Vochtighheids Niv.** Gebruik telkens het draaien van de draaiknop om te selecteren (de tekst wordt blauw) en het drukken op de draaiknop om te bevestigen.