
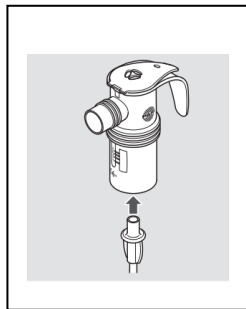



Verkorte gebruiksaanwijzing Paiboy Classic met LC sprint vernevelaar

Vernevelaar monteren



- Controleer vóór elk gebruik alle onderdelen van de vernevelaar en het toebehoren.
- Vervang gebroken, vervormde of sterk verkleurde onderdelen.
- Neem de aanwijzingen voor montage in deze gebruiksaanwijzing in acht.
- Steek het sproeieropzetstuk met een lichte druk op de sproeier in het onderste deel van de vernevelaar. De pijl op het sproeieropzetstuk moet daarbij naar boven wijzen.
- Plaats het bovenste deel van de vernevelaar op het onderste deel en sluit de vernevelaar door het bovenste deel naar rechts op het onderste deel te draaien.

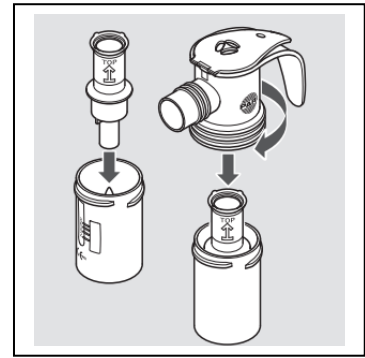

- Bevestig de aansluitslang aan de vernevelaar.

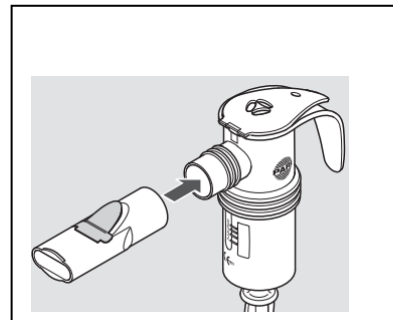

Steek het mondstuk op de vernevelaar.

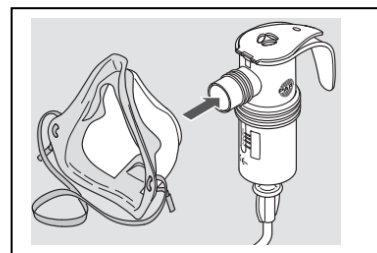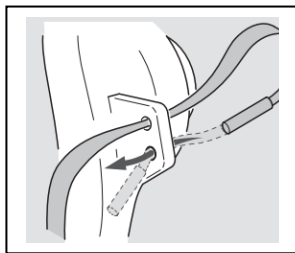

Masker gebruiken


- Bevestig indien nodig de elastieken band

Trek indien nodig het mondstuk van de vernevelaar af.

- Steek het masker op de vernevelaar aan het masker

Om een therapie uit te voeren gaat u als volgt te werk:


- Steek de aansluitslang van de vernevelaar met een licht draaiende beweging in de persluchtaansluiting van de compressor.

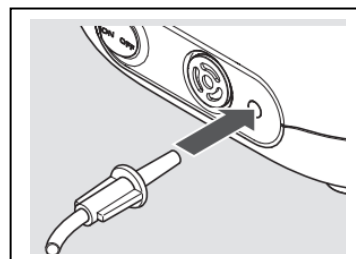


Vernevelaar vullen

Waarschuwing: Deksel van de vernevelaar kan afbreken Als het deksel in de verkeerde richting wordt bewogen, kan het afbreken. De vernevelaar is dan onbruikbaar en niet te repareren.


- Beweeg het deksel alleen in de door de scharnier gegeven richting.
- Plaats de vernevelaar in de daarvoor bedoelde houder op de compressor.
- Open het deksel van de vernevelaar door met de duimen van onderen tegen het deksel te duwen.

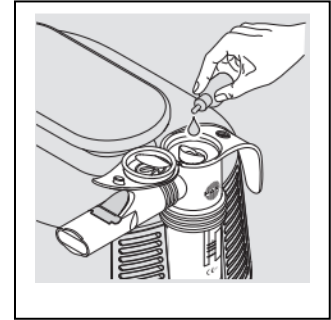

- Doe de vereiste hoeveelheid inhalatieoplossing van boven in de vernevelaar. Neem het minimale en maximale vulvolume in acht. Wanneer de vernevelaar te weinig of te veel vloeistof bevat, wordt afbreuk gedaan aan de verneveling en daarmee aan de therapie.
- Sluit het deksel van de vernevelaar. Let erop dat het deksel vastklikt. Wanneer meerdere inhalatieoplossingen na elkaar moeten worden gebruikt:
- Spoel de vernevelaar tussen de verschillende toepassingen uit met drinkwater.
- Schud het overtollige water uit de vernevelaar.
- Vul de vernevelaar op de beschreven wijze met de volgende inhalatieoplossing

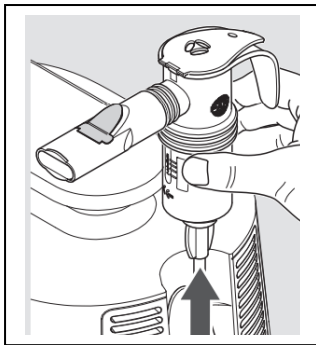

- j
- Neem de vernevelaar uit de houder en houd hem rechtop.
 - Vergewis u ervan dat alle delen vast met elkaar verbonden zijn.

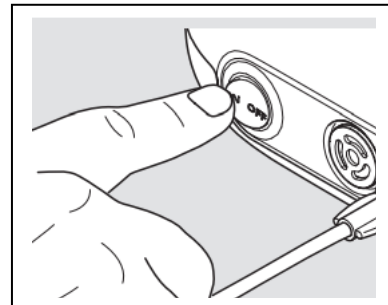

Schakel de compressor in.
Vergewis u ervan dat een aerosol wordt geproduceerd, voordat u met de therapie begint.

Volg nu de instructies zoals beschreven op de LAN instructie kaart.